

# 3DVisor

## Manuale d'uso



## Componenti



**N° 1 Supporto visiera**



**N° 2 Schermi protettivi**



**N° 1 coppia Fasce di sostegno stringi testa (SX + DX)**



**N° 1 Elastico per mento + clip chiusura (opzionale)**

## Caratteristiche

Maschera protettiva certificata EN166 contro schizzi, spruzzi e particelle volanti.


Leggerissima (60 grammi), dotata di gomma poggia fronte per garantirne un uso prolungato durante la giornata con il massimo comfort.

Schermo ribaltabile in diverse angolazioni e areazione regolabile.


Confezione con 1 schermo spesso + 1 ricambio. Consente l'uso dei propri occhiali o da vista

## Montaggio

- 1) Montare lo schermo protettivo ruotando la visiera di 180° all'indietro ed appoggiandola su un piano. Curvare lo schermo protettivo leggermente ed inserire gli appositi perni all'interno dei fori.

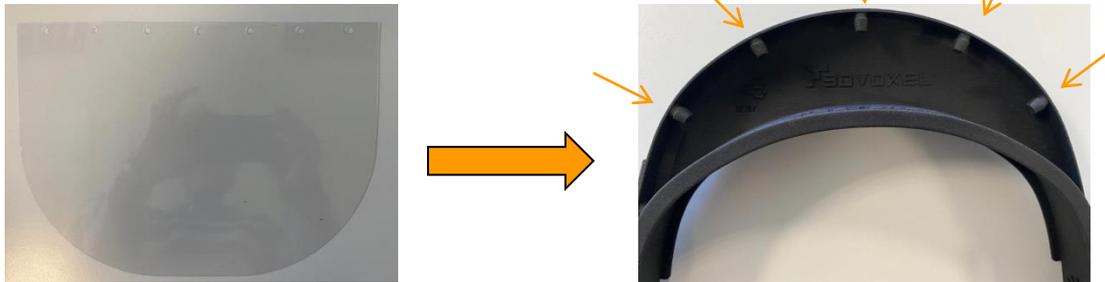

- 2) Agganciare le fasce di sostegno al supporto visiera. Accertarsi che le scritte siano rivolte verso l'esterno e osservare i riferimenti SX e DX per il collocamento

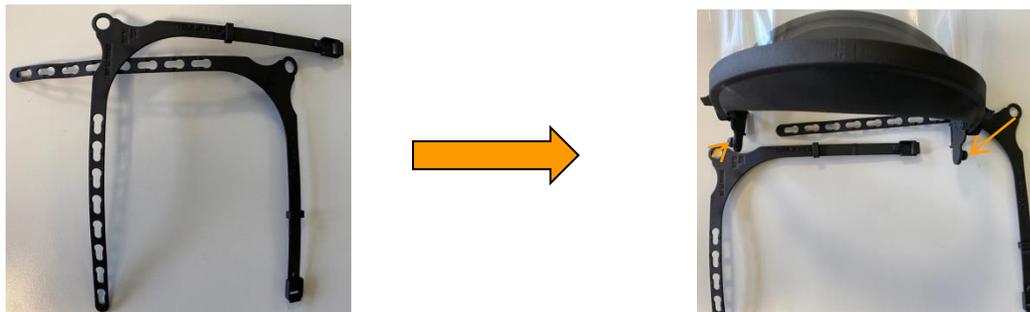

---

## Proprietà dello schermo 3DVisor

- ✓ Certificazione EN166
- ✓ Precisione dimensionale
- ✓ Dettagli fini
- ✓ Funzionalità delle parti
- ✓ Proprietà meccaniche
- ✓ Sostituibilità delle parti
- ✓ Leggerezza

## Manutenzione maschera protettiva

- Lo schermo protettivo va conservato in ambiente privo di vapori organici ed a una temperatura compresa tra i 5° e i 30°
- Pulire regolarmente lo schermo protettivo dopo ogni uso
- Verificare dopo ogni utilizzo che sullo schermo non vi siano evidenti danneggiamenti quali rigature, tagli o ammaccature
- Non effettuare mai operazioni di pulizia al sole
- Usare panni assorbenti o tessuti soffici antigraffio per asciugare lo schermo
- Utilizzare acqua tiepida o sapone neutro, oppure qualsiasi detergente convenzionale per impiego ottico come liquido pulente
- Non usare mai detergenti abrasivi o fortemente alcalini
- Non utilizzare alcol
- Non introdurre in autoclave

## Avvertenze

- Non utilizzare per l'osservazione diretta del sole
- Non utilizzare la maschera protettiva dopo un forte urto o sollecitazione eccessiva; rotture interne potrebbero causarne delle diminuzioni di resistenza per i successivi impatti
- Sostituire lo schermo protettivo dopo 3-4 utilizzi
- Sostituire il dispositivo dopo 2 anni dal primo utilizzo
- 3DVisor non previene la contrazione di malattie ma riduce puramente il rischio di spruzzi di liquidi organici negli occhi, nel naso e nella bocca dell'utilizzatore
- 3DVisor non è un dispositivo di protezione delle vie aeree
- Gli schermi che presentano danneggiamenti o graffi diminuiscono la visione e riducono seriamente la protezione del volto e devono essere sostituiti quanto prima
- Se si indossa lo schermo protettivo sopra la propria montatura correttiva prestare particolare attenzione; l'impatto con lo schermo potrebbe essere trasmesso alla montatura